



# Parkoppla hörapparater direkt till en Apple Iphone

- Phonak-modellerna **Marvel, Paradise, Lumity** och modeller med **M, P** eller **L** i namnet, till exempel **Bolero M90, P90** och **L90**.

## Telefonsamtal och media<sup>1</sup>

Parkoppla **den ena** hörapparaten till mobiltelefonen (det kommer att höras i båda hörapparaterna ändå).


- Starta om hörapparaterna.
- I mobiltelefonen: Gå till [Inställningar > Bluetooth > Andra enheter](#).
- Välj din hörapparat som kommer upp i listan (det kan vara den vänstra eller den högra).
- Följ instruktionerna och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser och användarvillkor.

Nu bör **den ena** hörapparaten visas i listan [Inställningar > Bluetooth > Mina enheter](#) enligt nedan.

### Mina enheter

[hörapparat\_vä/hö]<sup>2</sup> Ansluten ⓘ

Telefonsamtal och media ska nu kunna höras i hörapparaterna!

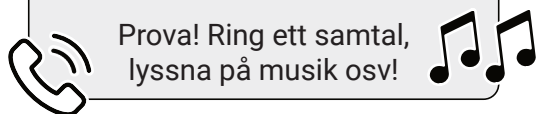

Prova! Ring ett samtal, lyssna på musik osv!

### Krångel? "Glöm" och gör om!

- Tryck på ⓘ-symbolen i Bluetooth-listan.
- Välj **Glöm den här enheten** och **Glöm enhet**.
- Radera appen från mobiltelefonen.
- Gör om hela parkopplingen.

## Appen = fjärrkontroll

Med appen kan du reglera volym, välja program med mera i hörapparaterna.

- I mobiltelefonen: Hämta och installera appen [MyPhonak](#) från appbutiken [App Store](#).
- Starta om hörapparaterna.
- Öppna appen och svara [Ja/Ok/Tillåt](#) på eventuella frågor om Bluetooth, notiser, aviseringar och användarvillkor.
- Välj [Parkoppla enhet](#) och klicka vidare tills appen visar [Söker...](#)
- Välj hörapparaterna i listan [Hittade enheter](#) och välj [Parkoppla](#).
- Välj [Fortsätt/OK](#) (motsvarande) ett antal gånger.

Nu bör hörapparaterna (med "LE\_" i början) ha lagts till i listan [Inställningar > Bluetooth > Mina enheter](#) enligt nedan.

### Mina enheter

[hörapparat\_vä/hö]<sup>2</sup> Ansluten ⓘ  
LE\_[hörapparat\_vä]<sup>2</sup> Ansluten ⓘ  
LE\_[hörapparat\_hö]<sup>2</sup> Ansluten ⓘ

Appen ska nu fungera som en fjärrkontroll!

Prova! Ändra volym, byt program osv!



- Musik, talböcker och poddar med mera.
- Namn på aktuell hörapparat, till exempel "carinas\_hörapparat\_vänster/höger"

Patient: .....

Hörapparat(er): .....

Datum: .....